

FÉCONDITÉ



Conseils pour obtenir les meilleurs résultats



Gardez les indicateurs de reproduction au chaud

Les indicateurs de reproduction Estroject™ doivent être chauffés jusqu'à 38°C juste avant l'application. La chaleur active la colle et permet une adhérence instantanée à des températures même très basses. L'indicateur de reproduction Estroject™ doit toujours être souple et flexible au moment de l'application pour une adhérence optimale.



Zone d'application

L'indicateur de reproduction Estroject™ doit être positionné sur la vache, à mi-chemin entre la hanche et la base de la queue et à la perpendiculaire de la colonne vertébrale.



Brossez le poil

Créez des conditions optimales d'adhérence en brossant vigoureusement le poil le long de la colonne vertébrale. Brossez dans le sens du poil pour éliminer poussières, saletés et poils morts.



Nettoyez le poil

Nettoyez la surface d'application au besoin à l'aide de la lingette de nettoyage Estroject™ pour éliminer complètement toute saleté, sable et poussières restants.



Appliquez l'indicateur de reproduction

Placez l'indicateur de reproduction sur la zone d'application. Appuyez fortement et frottez à main nues pour une adhérence parfaite au poil. Ne pas appliquer par temps de pluie.



Inséminer

Ne pas inséminer

Vérifiez les résultats

Lorsque les vaches sont chevauchées, la surface argentée et noire de l'indicateur de reproduction Estroject™, doté de la nouvelle technologie Breeding Bullseye™, s'efface par la friction provoquée par les chevauchements et laisse apparaître la couleur de l'indicateur. Une fois que le Breeding Bullseye™ est éliminé ou une zone équivalente, cela indique que l'animal est en chaleur et que le processus de reproduction doit être mis en place.